


Guía de referencia rápida

Aplicación Masimo SafetyNet™

ADVERTENCIA: No se autodiagnostique ni automedique de acuerdo a mediciones realizadas. Consulte siempre con su médico.

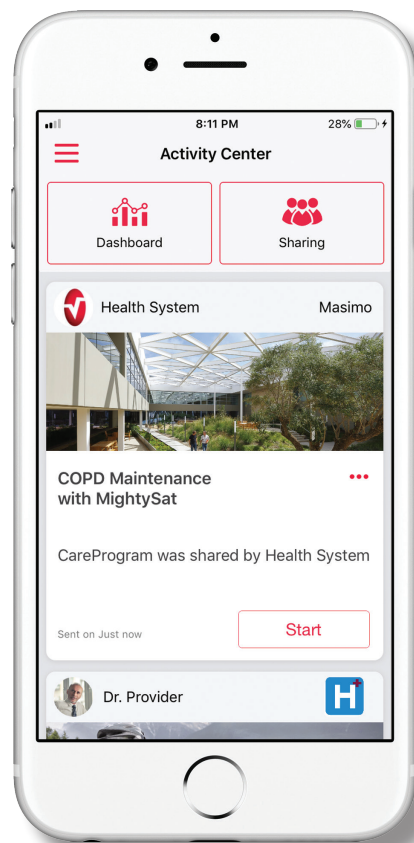

> Descargue e instale la aplicación Masimo SafetyNet en:

La App Store



Google Play



> Inicie la aplicación y siga las instrucciones detalladas para crear una cuenta, participar de manera compartida en CareProgram™ y empezar a recopilar y compartir datos.

Para más ayuda o preguntas, visite:
www.masimo.com/masimo-safetynet



No está destinado a ser utilizado para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de ninguna enfermedad. La marca comercial PATIENT SAFETYNET se utiliza bajo licencia de University HealthSystem Consortium. El resto de marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2020 Masimo Corporation
301370/LAB-10724A-0420
EN-LAB-10206B

www.masimo.com


Inicio, registro y notificaciones

> Asegurarse de tener activadas las notificaciones para el correcto funcionamiento de la aplicación.

> Sign Up (Registro)

- Si ha recibido un CareProgram por parte de un profesional sanitario, debe registrarse con el correo electrónico o el número de teléfono utilizado para enviar su invitación.
- Regístrese para obtener una cuenta utilizando el correo electrónico, el teléfono o con el inicio de sesión único de Google como nombre de usuario.

iOS

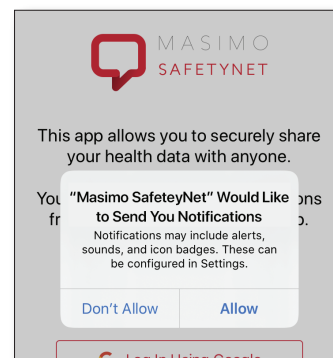

ACTIVAR LAS NOTIFICACIONES

www.masimo.com



This app allows you to securely share your health data with anyone.

You can also receive care instructions from your doctor through this app.


 Log In Using Google

Or Log In Using Doctella ID

Sign Up

Log In


Android

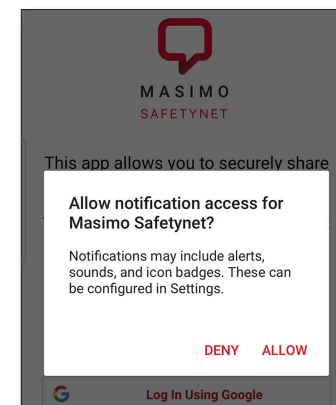

2


Autorizaciones sanitarias

iOS

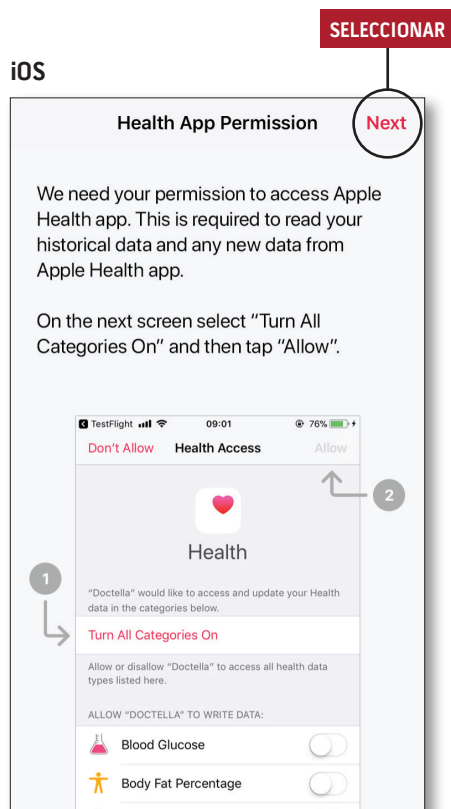

> **Siga las instrucciones que aparecen en pantalla:** Para que Masimo SafetyNet acceda y recopile los datos de salud del dispositivo.

Android

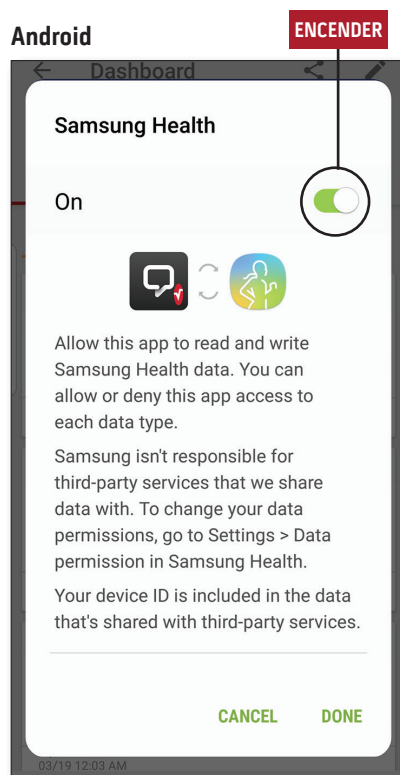

Centro de actividad

> **Menú**

- Ve a el menú de la aplicación.

> **Dashboard (Panel de control)**


- Ve a la pantalla del Dashboard (Panel de control), que muestra los datos de salud del usuario.
- Ve a los datos de salud compartidos por otros usuarios.

> **Sharing (Datos compartidos)**


- Muestra los profesionales sanitarios, los cuidadores y los familiares con los que el usuario está compartiendo datos.
- Comparta datos con otro profesional sanitario, cuidador o familiar.

> **CareProgram**

- Permite al usuario ver o borrar un CareProgram.

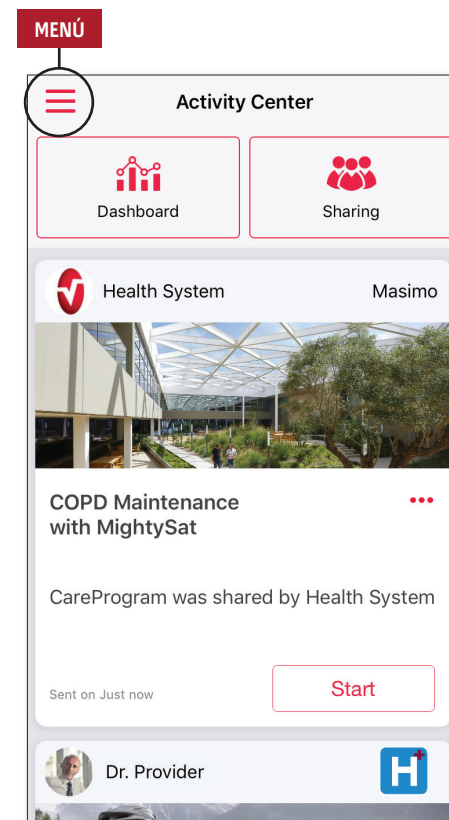

Menú

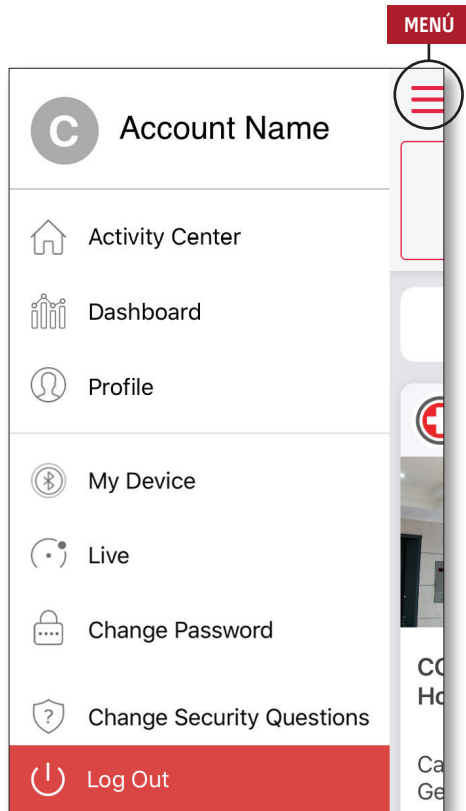

> Feedback (Comentarios)

- Permite al usuario enviar un correo electrónico al soporte de Masimo SafetyNet.

> Rate on App Store (Valoración en App Store)

- Permite al usuario calificar la aplicación en App Store.

> Activity Center (Centro de actividad)

- Muestra la pantalla del Activity Center (Centro de actividad).

> Dashboard (Panel de control)

- Muestra la pantalla del Dashboard (Panel de control).

> Profile (Perfiles)

- Muestra la información del perfil del usuario.
- Permite al usuario modificar la información del perfil.

> My Device (Mi dispositivo)

- Permite al usuario añadir un dispositivo para el control.

> Live (En directo)

- Permite al usuario ver los datos del dispositivo de control conectado.

> Change Password (Cambiar contraseña)/Change Security Questions (Cambiar preguntas de seguridad)

- Permite al usuario cambiar la contraseña y/o las preguntas de seguridad en caso de pérdida de la contraseña.


> Notification Settings (Ajustes de notificaciones)

- Permite al usuario cambiar los ajustes de notificaciones y recordatorios de la aplicación.

> Settings (Ajustes)

- Muestra la información del usuario.
- Permite al usuario activar o desactivar el Touch ID o el Face ID para iniciar sesión en la aplicación.
- Muestra la información de la aplicación.

Panel de control

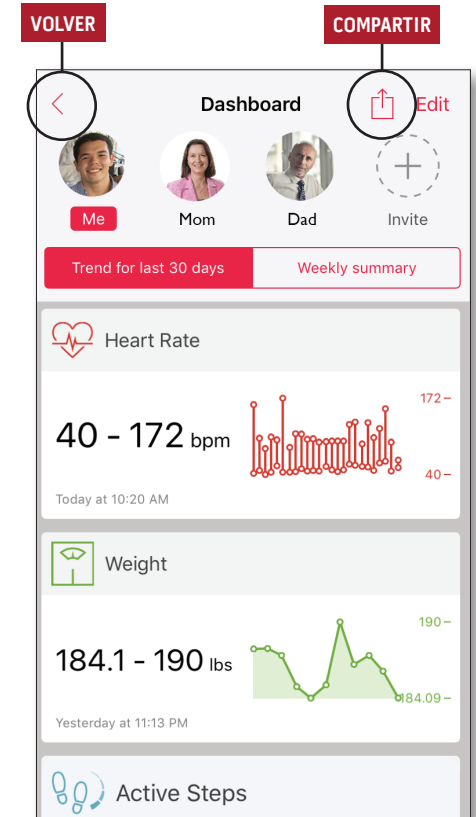

> Invite (Invitar)

- Permite al usuario invitar a otros a compartir información a través de la aplicación.

> Sharing (Datos compartidos)

- Muestra los profesionales sanitarios, los cuidadores y los familiares con los que el usuario está compartiendo datos.

> Edit (Editar)

- Permite al usuario reorganizar los datos en el panel de control.

> Ver datos de los últimos 30 días o un resumen semanal.

> Seleccionar una tarjeta de parámetros para ver tendencias, intervalos de fechas y datos adicionales.

CareProgram

INICIO

> Care Card (Tarjeta sanitaria)

- Vea los datos de la Care Card (Tarjeta sanitaria).

> Inicio

- Vuelva al Activity Center (Centro de actividad).

> Learn (Más información)

- Acceda a información adicional proporcionada por un cuidador.

> Care Team (Equipo de cuidados)

- Vea la lista compartida de profesionales sanitarios, cuidadores y familiares.

Datos compartidos

VOLVER

AÑADIR

> Muestra la lista compartida de profesionales sanitarios, cuidadores y familiares.

> Añadir

- Comparta información con otros profesionales sanitarios.
- Comparta información con otros cuidadores o familiares.

> Deslice para editar los privilegios.

AÑADIR