

Componentes del sistema: Dispositivos reutilizables



Radius VSM



Dispositivo multifunción
(si es necesario)



Módulo de PANI
(si es necesario)

Componentes del sistema: Desechables



Brazalete
Seleccionar tamaño (S, M, L)



Sensor de SpO₂
RD CS-1
(Neonatal o adulto)




Sensor RRa®
(Si es necesario)



Electrodos de ECG
(Si es necesario)



Manguito de PANI
(Si es necesario) Seleccionar tamaño (Adulto pequeño, Adulto, Adulto grande)

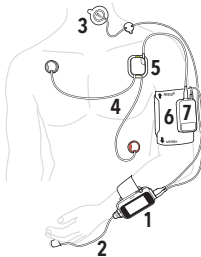

Descripción del dispositivo

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Radius VSM 2. Sensor de SpO₂ 3. Sensor acústico 4. Electrodo de ECG 5. Dispositivo multifunción reutilizable y sensor de temperatura y posición 6. Manguito de PANI 7. Módulo de PANI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Botón de encendido y luz de estado 2. Puerto de accesorios verde: Conexión del módulo de PANI o el MFP. 3. Puerto de accesorios azul: Conexión para el sensor rainbow acoustic monitoring® 4. Botones de liberación 5. Altavoz 6. Puerto de cable del paciente |
|---|--|



Instrucciones de configuración

1



En Root®:

1. Asegúrese de que Bluetooth® esté activado.
2. Cargue completamente Radius VSM en la ranura inferior del cargador.
3. Utilice este Radius VSM cargado para monitorizar al paciente.

2



Coloque Radius VSM y el brazalete en el brazo del paciente:



1. Coloque el VSM en el soporte.
2. Ajuste para asegurar.
3. Tire del brazalete a través de la ranura en el soporte.

3



Sensor de SpO₂:

1. Elija el sensor de SpO₂.
2. Coloque el sensor en el dedo y conéctelo a Radius VSM.

4




En Root:

1. Asegúrese de que Bluetooth esté activado.
2. Mueva el segundo Radius VSM a la parte inferior del cargador para que pueda cargarse mientras se está usando el primer Radius VSM.
3. Confirme si la pletismografía y el valor se muestran en Root.

Instrucciones de configuración


5

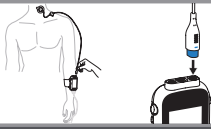

(Opcional) Coloque el sensor acústico

1. Coloque el sensor RRA en el cuello.
2. Conecte el conector de cable **azul** del sensor acústico al puerto **azul** del dispositivo Radius VSM.


6

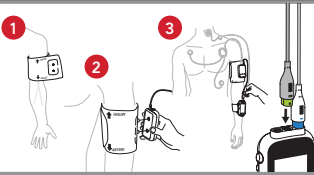

(Opcional) Conecte el manguito de PANI y el módulo de PANI

1. Elija un manguito acorde al tamaño del paciente.
2. Coloque el manguito en el brazo del paciente (preste atención a la orientación).
3. Coloque el módulo de PANI en el manguito (cable apuntando hacia arriba). Conecte el conector de cable **verde** del módulo de PANI al puerto **verde** del dispositivo Radius VSM.

7

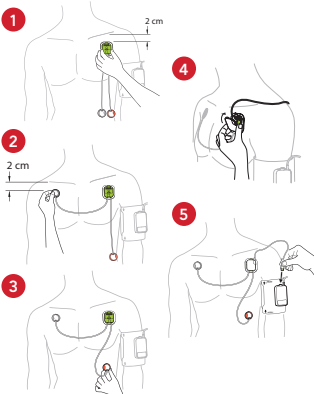

(Opcional) Conecte los electrodos de ECG

1. Prepare la piel del paciente.
2. Coloque la base del electrodo/conector principal (extremidad superior izquierda) en la línea media de la clavícula, aproximadamente 2 cm debajo de la clavícula izquierda del paciente.
3. Coloque el segundo electrodo rojo (extremidad superior derecha) en la línea media de la clavícula, aproximadamente 2 cm debajo de la clavícula derecha del paciente.
4. Coloque el tercer electrodo verde (extremidad inferior izquierda) en la línea axilar anterior (borde externo del estómago), entre la última costilla y el hueso pélvico.
5. Acople el módulo a la base.
6. Conecte el conector de cable verde del módulo del dispositivo al conector verde del módulo de PANI o directamente al conector verde de Radius VSM (si no hay NIBP).

8



En Root:

1. Ajuste las alarmas.
2. Si está conectado a Patient SafetyNet™, admita al paciente.

Problema	Posibles causas	Pasos a seguir
El dispositivo no se enciende.	<ul style="list-style-type: none"> > Batería agotada. > Falla interna. 	<ul style="list-style-type: none"> > Cargue la batería. > Póngase en contacto con el Departamento de Servicio de Masimo.
Alarma técnica de falla del sistema activa (tono continuo del altavoz).	<ul style="list-style-type: none"> > Falla interna. 	<ul style="list-style-type: none"> > Para silenciar una alarma, pulse el botón de silencio de alarma. Si la alarma sigue sonando, apague el Radius VSM. > Póngase en contacto con el Departamento de Servicio de Masimo.
La pantalla del dispositivo está en blanco.	<ul style="list-style-type: none"> > El dispositivo está apagado. > La batería se puede haber agotado. > Falla interna. 	<ul style="list-style-type: none"> > Apague Radius VSM y enciéndalo. > Cargue la batería. > Póngase en contacto con el Departamento de Servicio de Masimo.
Los botones o la pantalla táctil no responden cuando se oprimen.	<ul style="list-style-type: none"> > Interferencia electromagnética (EMI). > Falla interna. 	<ul style="list-style-type: none"> > Distancie este dispositivo de otros dispositivos que puedan producir interferencia electromagnética. > Póngase en contacto con el Departamento de Servicio de Masimo.
El módulo Radius VSM no se carga.	<ul style="list-style-type: none"> > El conector en carga tiene una conexión deficiente. > Batería dañada. > Falla interna. 	<ul style="list-style-type: none"> > Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente asentado en el adaptador de carga. > Reemplace el módulo Radius VSM. > Póngase en contacto con el Departamento de Servicio de Masimo.

Si alguno de los síntomas anteriores persiste, consulte el Manual del operador o comuníquese con el Departamento de Servicio de Masimo.
 * La marca comercial Patient SafetyNet se utiliza conforme a la licencia de University HealthSystem Consortium.
 Para uso por parte de profesionales. Consulte las instrucciones de uso para obtener información completa de prescripción, que incluye indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.